

Integration BEGO Implantat & Model Creator Bibliothek in exocad

Date	Juli 2023
Version	1.0

Bei den Bibliotheken wird zwischen der Implantat und der Model Creator Library (Bibliothek) unterschieden. Um die BEGO Bibliotheken richtig nutzen zu können, müssen die heruntergeladenen Dateiordner in die korrekte exocad Ordnerstruktur kopiert werden.

ACHTUNG: Nicht alle Implantat Systeme beinhalten eine Model Creator Library.

Die entsprechenden exocad Ordner befinden sich im Installationsverzeichnis unter:

Implantat Library:

“...\\DentalCADApp\\library\\implant“


Model Creator Library:

“...\\DentalCADApp\\library\\modelcreator\\implants“

Hinweis: Um Verwechslungen zu vermeiden ist es von Vorteil, eine bereits installierte Vorversion der entsprechenden BEGO Bibliothek zu **löschen** oder in ein Archiv Verzeichnis zu verschieben, **bevor** die aktuelle Version eingefügt wird.

Schritt für Schritt Anleitung für die Integration nach abgeschlossenem Download:

1. Die entsprechende exocad Implantat Bibliothek (a.) auswählen und das relevante Implantat System (b.) durch Mausklick auf die entsprechende Kachel herunterladen. Die heruntergeladene Datei sollte sich auf dem Rechner im Verzeichnis **“Downloads“** befinden.

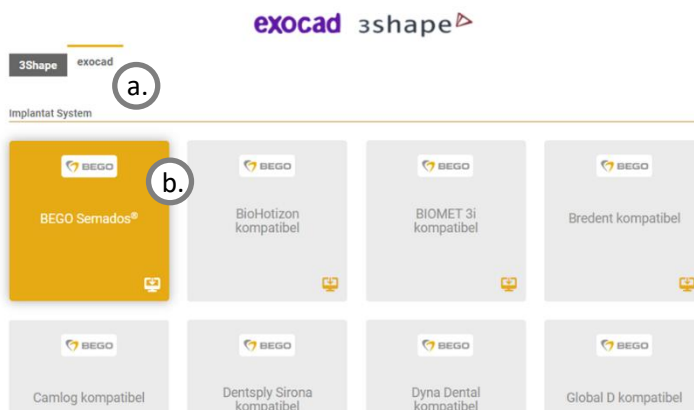


2. Entpacken der heruntergeladenen zip-Datei der entsprechenden Implantat Bibliothek.




3. Ordner der Bibliothek öffnen.

In Verzeichnis **"Implantat Library"** befinden sich die Implantat Bibliotheken für das prothetische Design. Im optionalen Ordner **"Model Creator Library"** befinden sich die entsprechenden Komponenten für die Modellherstellung.


Achtung: Nicht jeder Download beinhaltet eine Model Creator Library.

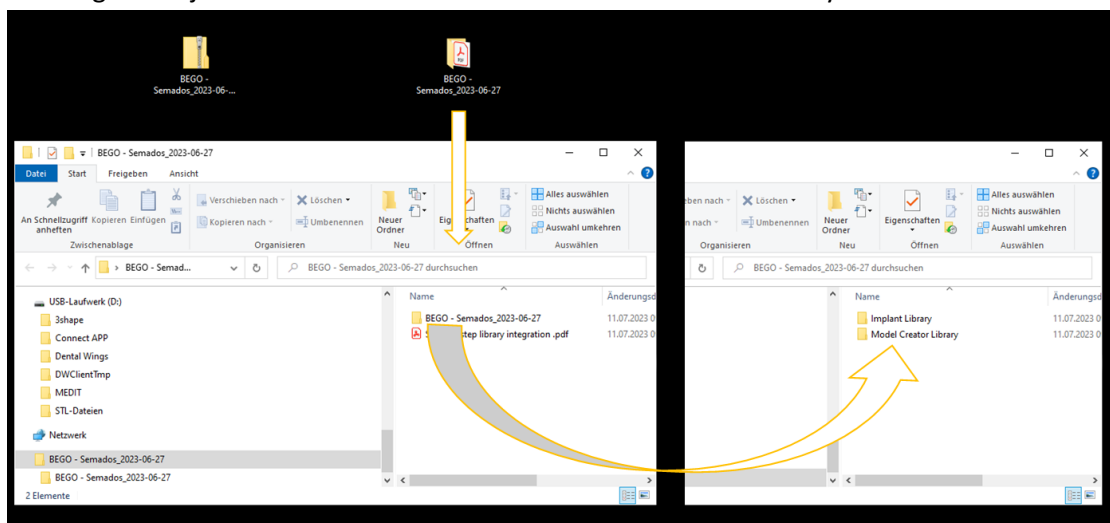


4. Zur Integration der **Implantat Bibliothek** den Ordner **"Implant Library"** öffnen und alle darin befindlichen Unterordner markieren und kopieren.

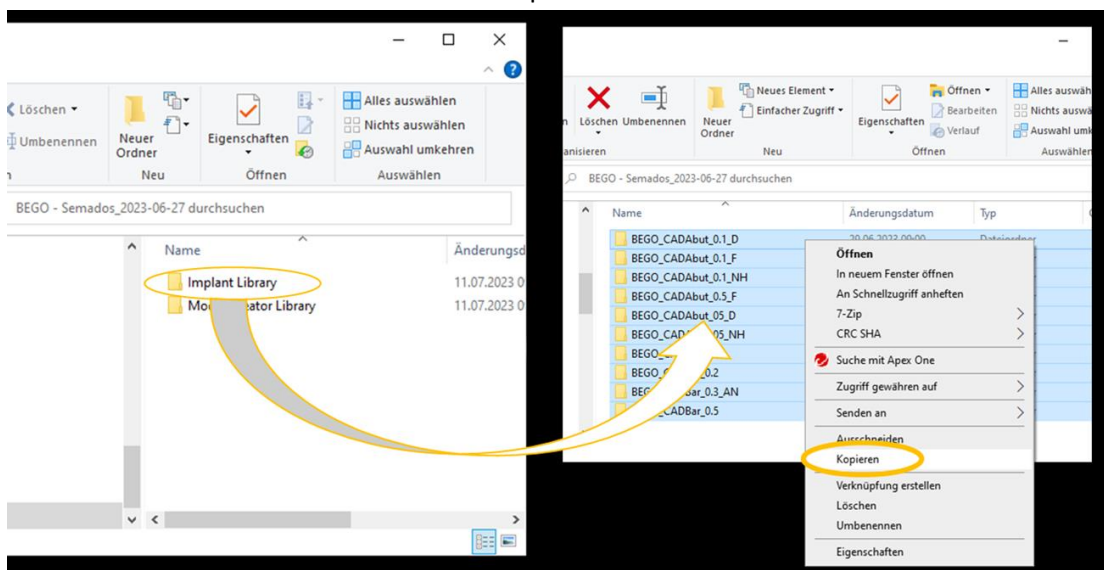

- Im exocad Installationspfad "...\\DentalCADApp\\library" den Ordner "...\\implant" suchen und öffnen.
- Die kopierte Implantat Bibliothek in den "...\\implant" Ordner einfügen.

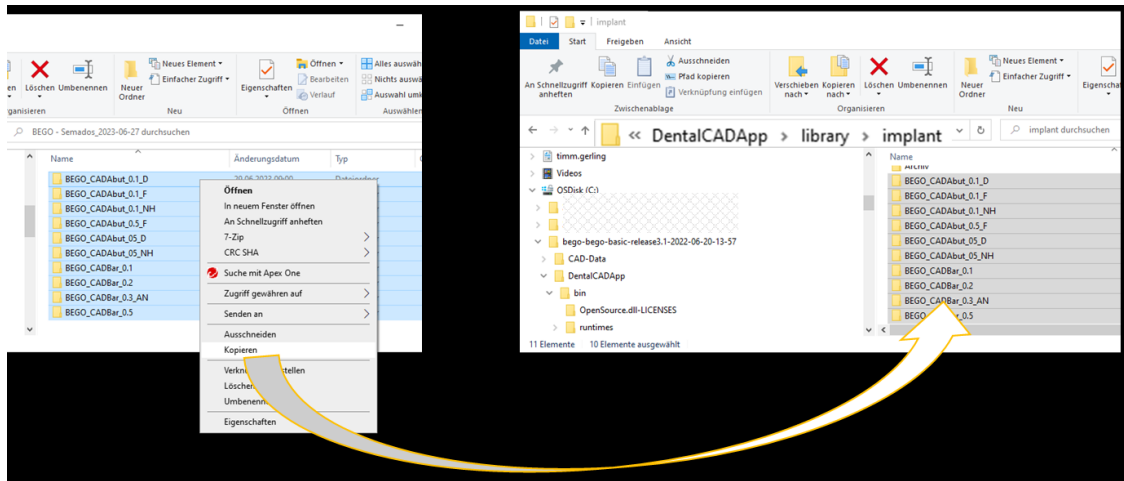

- Abschließend ggf. prüfen, ob die kopierten Ordner nur die Implantat Dateien und keine extra Unterordner beinhalten.

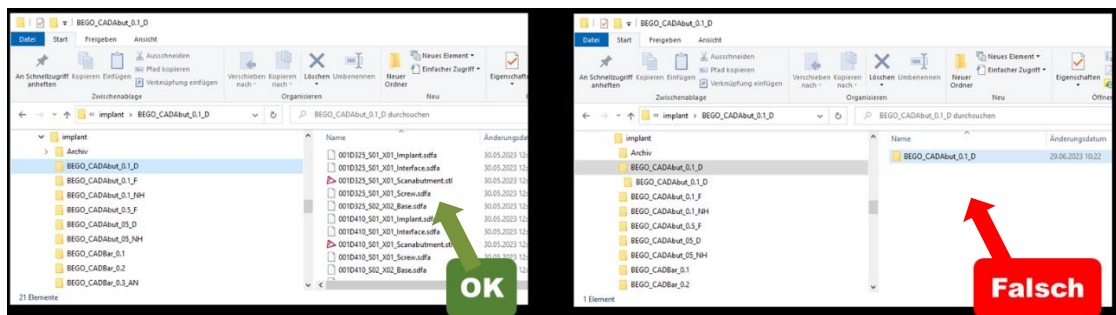

Falls doch ein weitere Unterordner enthalten ist, diesen bitte direkt in den "...\\implant" Ordner kopieren.


- Die neu integrierte Implantat Bibliothek steht nach Neustart der **DentalCAD** zur Anwendung bereit.

Sollten auch Dateien für die digitale Modellherstellung enthalten sein, befinden sich diese im Ordner: **"Model Creator Library"**.


Die Integration ist **optional** und kann wie folgt durchgeführt werden:

- Ordner **"Model Creator Library"** innerhalb der heruntergeladenen Datei öffnen und alle darin befindlichen Unterordner markieren und kopieren.


Achtung: Die Ordnerbezeichnung innerhalb der Model Creator Library ist identisch mit der Implant Library, enthält aber andere Dateien.

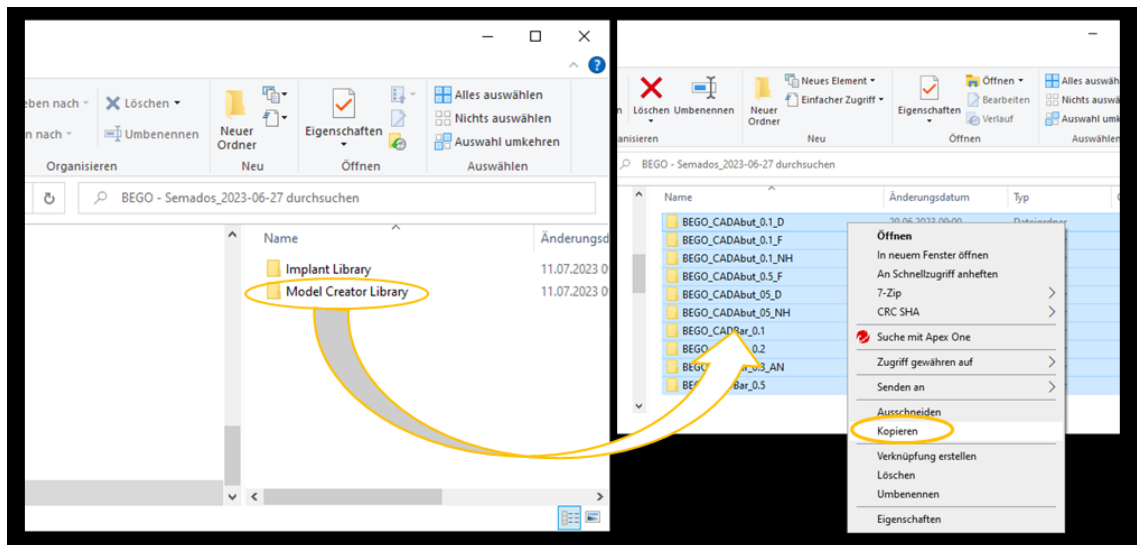

2. Den exocad "...\\modelcreator " Ordner innerhalb des Pfads "...\\DentalCADApp\\library" suchen und den Unterordner "...\\implants" öffnen.
3. Die kopierte Model Creator Bibliothek in den exocad " ...\\modelcreator\\implants" Ordner einfügen.

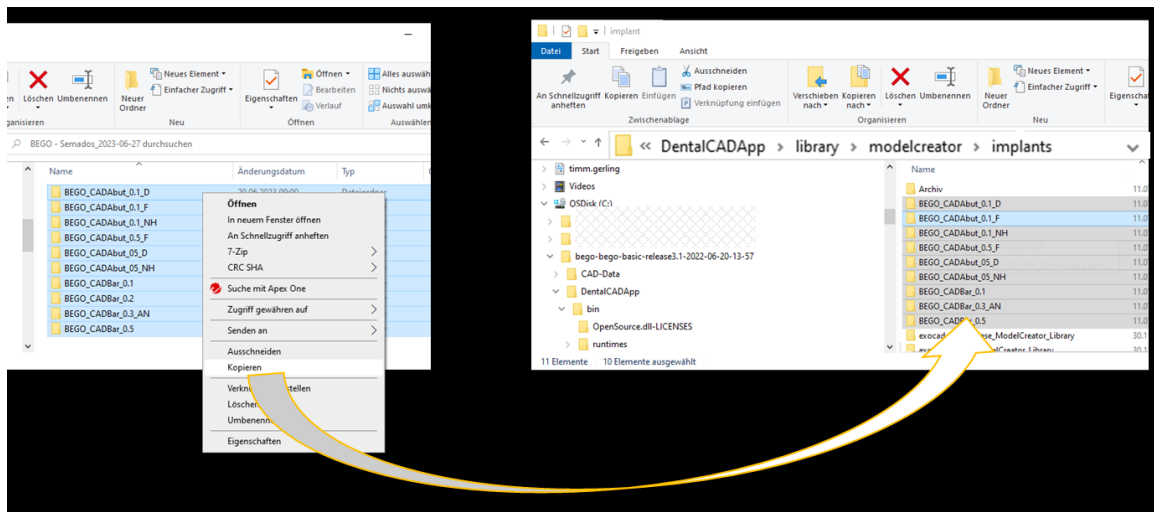

4. Abschließend ggf. prüfen, ob die kopierten Ordner nur die Model Creator Dateien und keine extra Unterordner beinhalten.

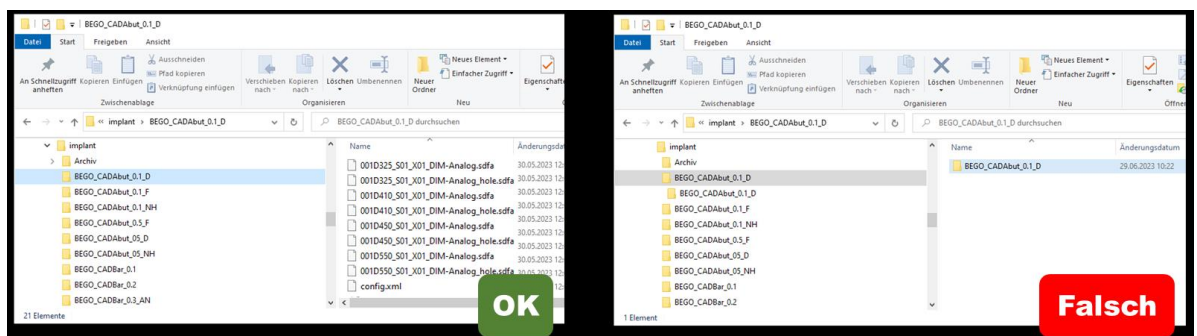

5. Die neu integrierte Model Creator Bibliothek steht nach Neustart der **DentalCAD** zur Anwendung bereit.